

RENGØRING OG DESINFEKTION AF MEDICINSK UDSTYR

Sekusept® aktiv

Kombineret rengøring og desinfektionsmiddel, baseret på peredikesyre.

Aldehydfrit aktivt rengørings- og desinfektionsmiddel til instrumenter og specielt til termolabile endoskoper. CE-mærket i overensstemmelse med medicinsk direktiv MDD 93/42/EEG.

Sekusept aktiv er en kombination af højeste effektivitet og høj materialkompatibilitet for såvel plast og metalinstrumenter.

Sekusept aktiv:

- ▲ "Rengøring og desinfektion i en og samme procedure"
- ▲ Særdeles effektiv desinfektion mod et bredt spektra af mikroorganismer inkl. bakteriesporer
- ▲ PerOxyBalance teknologi (Peredikesyre med neutralt eller svagt alkalisk pH-værdi)
- ▲ Et let anvendeligt produkt med lav dosering. Økonomisk og sikker i anvendelse.



Sekusept® aktiv

Kombineret rengøring og desinfektionsmiddel, baseret på peredikesyre.

Hvorfor bruge Sekusept aktiv?

Desinfektion har et vigtigt formål som er renhed. Dette er specielt gældende for termolabile instrumenter som ikke kan steriliseres.

Udelukkende den maximale reduktion af sekreter og restproteiner, garanterer et optimalt resultat ved rengøring af skoper og instrumenter

PEROXYBALANCE® KONCEPT

PerOxyBalance desinfektionsmiddel fra Ecolab giver en idealistisk balance imellem materialeforenelighed, hurtig antimikrobiell effekt og anvendelse.

Optimering af PH værdien inden for det neutrale område. PerOxyBalance® er sikkert for såvel, patienter, personale og instrumenter.



Sekusept Aktiv 1.5kg beholder

PerOxyBalance®

The active substance with "Oxy Power"

OBS!: Anbefales IKKE til messing, kobber eller mekanisk skadede forkromede instrumenter, da korrosion kan opstå.

DOKUMENTERET EFFEKT

MIKROBIOLOGISK TESTRESULTAT - 2% KONCENTRATION	KONTAKTTID
Effekt under EN 13727 og EN 14561 (baktericid) samt EN 13624 og EN 14562 (fungicid) i rene og ikke rene miljøer	5 min
Effekt under EN 14348 og EN 14563 (mykobaktericid) i rene og ikke rene miljøer	5 min
Effekt under EN 13704 (sporicid)	15 min
Effekt under EN 14347 (sporicid - C difficile)	5 min
Effekt under EN 14476 (virucid) i rene og ikke rene miljøer	10 min

ANBEFALING- 2% KONCENTRATION	KONTAKTTID
Bredt effektspektrum (baktericid, fungicid, sporicid, mykobaktericid og virucid) i rene og ikke rene miljøer.	15 min

ECOLAB A/S

Høffdingsvej 36
2500 Valby
Tel: 36158515
Fax: 36158548

Email: dk@ecolab.com
www.dk.ecolab.eu

© Ecolab 2013 5512.7/01.13

FABRIKANT

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599 0

CE 0297

SAFE.
FLEXIBLE.
RELIABLE.

ANVENDELSE

For desinfektion og rengøring af kirurgiske instrumenter. Specielt velegnet til termolabile udstyr som eksempelvis Flexible skoper og anæstesiudstyr. instrument.

TILBEREDNING AF BRUGSOPLØSNING

Benyt den vedlagte måleskå = 20g/30ml til 1 liter vand, giver en opløsning på 2%. Bland vand og pulver og rør flere gange i opløsningen under 15 minutter. Efter 15 minutter er opløsningen klar til brug.

PROCEDURE

Placer instrumenterne i Sekusept aktiv opløsningen umiddelbart efter brug. Se till at instrumenterne er helt tildækket i opløsningen. Vær sikker på at alle overflader og biopsikanaler har kontakt med opløsningen.

Skyl efter med rent vand, gerne sterilt eller demineraliseret.

Opløsningen ska skiftes dagligt eller ved visuel forurening.

AKTIVT KOMPONENT I PRODUKTET

Peredikesyre som dannes under tilberedning af brugsopløsningen.

PRODUKTINFORMATION OG BESTILLING

PRODUKT	ENHED	PAK	ART NR
Sekusept aktiv beholder med måleskå	1.5kg	4	3050510
Sekusept aktiv test strips	50 st	4	3007370

ECOLAB®